

# NasalKid®

Ácido hialurónico 0,2%

## DESCONGESTIONANTE NASAL

Solución salina con ácido hialurónico 0,2%

### NASALKID® Solución salina - Spray Nasal

El buen estado de la mucosa nasal es fundamental en la respiración ya que filtra, humidifica y calienta el aire que respiramos. Hay determinadas situaciones en las que la mucosa nasal se encuentra alterada: rinitis como consecuencia de procesos catarrales, alergia, sequedad de las fosas nasales tras procesos quirúrgicos, aire acondicionado o por tratamientos farmacológicos.

**NasalKid®** es una solución salina con 0,2% de ácido hialurónico cuyo alto poder hidratante ayuda a restaurar la mucosa nasal y favorece su normal funcionamiento.

#### Composición

Agua purificada, cloruro de sodio, hialuronato de sodio, sorbato de potasio, metilparabeno de sodio y ácido clorhídrico.

#### Indicaciones

**NasalKid®** solución salina en spray nasal es un producto sanitario que puede utilizarse en adultos y en niños a partir de 1 año. Está indicado en situaciones que requieran lavado o eliminación de secreciones nasales y cuando se precise hidratar la mucosa nasal por encontrarse alterada por varias situaciones, como por ejemplo: rinitis como consecuencia de un proceso catarral, alergias, sequedad de las fosas nasales tras un proceso quirúrgico, aire acondicionado o tratamiento farmacológico.

#### Instrucciones de uso

1. Agitar y retirar la cubierta protectora.
2. Insertar suavemente el extremo del aplicador en un orificio nasal.
3. Pulsar el aplicador para pulverizar el producto.
4. Dejar escurrir el exceso de solución con el fin de extraer la mucosidad y luego sonarse.
5. Repetir en el otro orificio nasal.
6. Limpiar la punta con agua jabonosa, enjuagarla, secarla y volver a colocar la cubierta protectora.

Aplicar 1-2 pulverizaciones en cada orificio nasal, varias veces al día.

#### Advertencias

- La fuente de ácido hialurónico no es de origen animal, se obtiene mediante fermentación bacteriana.
- Por razones de higiene y para evitar la propagación de patógenos, el envase no debe ser utilizado por más de una persona.
- En caso de alergia conocida o sospechada al ácido hialurónico o a cualquiera de los otros componentes de este dispositivo médico, como medida de precaución, se recomienda no utilizarlo.
- Desechar tres meses después de la apertura.
- No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada en la caja y la botella.
- Mantener en un lugar fresco y seco. Mantener por debajo de 40°C.
- Mantener el producto alejado del alcance de los niños.

#### Presentación

**NasalKid®** solución salina en spray nasal 20 ml, sin gas propelente, para uso en niños de más de 1 año de edad.

Fecha última revisión: 31-05-2019

#### PHARMALINK S.L.

Av. Universitat Autònoma, 13  
Parc Tecnològic del Vallès  
08290 Cerdanyola del Vallès  
Barcelona (España)  
Atención al cliente: +34 666 570 401  
www.pharmalink.es

Comercializado por:

**NORDIC PHARMA S.A.U.**  
Adolfo Pérez Esquivel, 3 2º Of. 17  
Edificio Las Américas III  
28232 Parque Empresarial Las Rozas  
Madrid / España

 0051

MA687/03