Ácido hialurónico 0.2%

#### **DESCONGESTIONANTE NASAL**

Solución salina con ácido hialurónico 0,2%

NASALKIE

# NASALKID<sup>®</sup> Solução salina em spray nasal

O bom estado da mucosa nasal é fundamental para a respiração uma vez que esta filtra, humidifica e aquece o ar que respiramos. Há determinadas situações em que a mucosa nasal se encontra alterada: rinite como consequência de processos catarrais, alergia, secura das fossas nasais após processos cirúrgicos, exposição ao ar condicionado ou por tratamentos farmacológicos.

Nasalkid <sup>®</sup> é uma solução salina com ácido hialurónico cujo alto poder hidratante ajuda a restaurar a mucosa nasal e favorece o seu normal funcionamento.

## Composição

Água purificada, cloreto de sódio, hialuronato de sódio, sorbato de potássio, metilparabeno de sódio e ácido clorídrico.

## **Indicações**

Nasalkid® solução salina em spray nasal é um dispositivo médico que pode ser utilizado por adultos e crianças a partir de 1 ano de idade. Está indicado nas situações que requeiram a lavagem ou eliminação das secreções nasais e para quando é necessário hidratar a mucosa nasal por esta se encontrar alterada por diferentes causas, por exemplo: rinite causada por processos catarrais, alergia, secura das fossas nasais após processos cirúrgicos, exposição ao ar condicionado ou por tratamentos farmacológicos.

## Modo de utilização

- 1. Agitar e remover a tampa protetora.
- 2. Introduzir suavemente o extremo da cânula num orifício nasal.
- 3. Pressionar o aplicador do spray para pulverizar o produto.
- 4. Deixar drenar o excesso de solução de forma a extrair o muco e depois assoar-se.
- 5. Repetir a operação no outro orifício nasal.
- 6. Limpar a ponta com água e sabão, enxaguar, secar e repor a tampa protetora.

Aplicar 1-2 pulverizações em cada orificio nasal, várias vezes ao dia.

#### **Advertências**

- A fonte de ácido hialurónico não é de origem animal, este é obtido a partir de fermentação bacteriana.
- Por razões de higiene e com a finalidade de evitar a transmissão de patógenos, esta embalagem não deve ser utilizada por mais de uma pessoa.
- Em caso de suspeita ou de conhecida alergia a qualquer dos componentes deste dispositivo médico, como precaução, é aconselhável não o utilizar.
- Descartar passados três meses após a abertura.
- Não utilizar o produto depois do prazo de validade indicado na caixa e no frasco.
- Manter em local fresco e seco. Manter abaixo de 40°C.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

### **Apresentação**

**Nasalkid**<sup>®</sup> solução salina em spray nasal 20 ml, sem gás propelente, para utilização em crianças com mais de 1 ano de idade.

Data da última revisão: 31-05-2019

#### PHARMALINK S.L.

Av. Universitat Autònoma, 13 Parc Tecnològic del Vallès 08290 Cerdanyola del Vallès Barcelona (España) Atención al cliente: +34 666 570 401 www.pharmalink.es Comercializado por:

# NORDIC PHARMA S.A.U.

Adolfo Pérez Esquivel, 3 2° Of. 17 Edificio Las Américas III 28232 Parque Empresarial Las Rozas Madrid / Esoaña **C** € 0051

MA687/03